

IHI

Realize your dreams

いつでも殺菌済みのクリーンなスリッパをお使いいただけます。

クリーンな空間の味方です。

一般医療機器
届出番号 33B2X00005000001

スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX

清潔

光触媒加工の専用防臭スリッパを
紫外線で殺菌し、清潔な状態を保ちます

新しい

より判りやすく、より機能的に
従来品をベースにデザインをリニューアルしました

コンパクト

10足収納で「高さ1207×幅341×奥行445mm」
コンパクト設計なので置き場所を選びません




SSDX

SSDX-V

スリッパ殺菌のしくみ

紫外線を3方向から照射

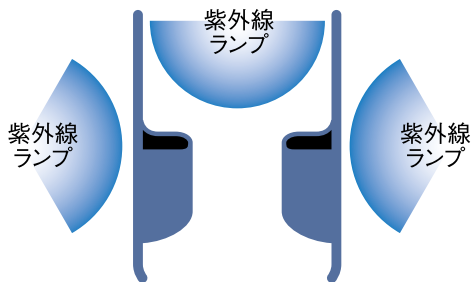

- すべての面に紫外線が照射されます。
- 前あきスリッパなので、つま先部分もしっかり殺菌できます。

専用スリッパを
ご使用ください
専用スリッパ

ブルーグレー

ミントグリーン



ワインレッド

ココアブラウン

※本体ご購入時に専用スリッパが10足付属しております。

シンプル&コンパクトデザインで、わずかなスペースでも設置可能。 スッキリとした印象を与え、清潔感をアピール。



■殺菌効果

(社団法人 北里研究所 医療環境科学センターの分析結果より)

| 菌種 | 紫外線照射時間 | |
|-------|---------|------------|
| | 90%殺菌率時 | 99.99%殺菌率時 |
| ブドウ球菌 | 10秒 | 40秒 |
| 大腸菌 | 10秒 | 40秒 |
| 緑膿菌 | 55秒 | 3分 |
| 真菌 | 20分 | 30分 |
| 水虫菌 | 20分 | 30分 |

■使用法


1 使用済のスリッパを本体上部の返却口に置くと返却口が開き、専用スリッパがボックス内に収納されます



2 紫外線がスリッパの裏側、内側とも均一に殺菌します

3 ボックス内に収納されている間中、殺菌されています

4 ボタンを押すと、ボックスの下から一足ずつスリッパが出てきます

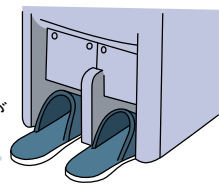

※スリッパを正しく返却しないと詰まりの原因となりますのでご注意ください

■仕様

| | |
|---------|----------------------------------|
| 名称 | スリッパ殺菌ディスペンサー |
| 型式 | SSDX(-V) |
| 電源電圧 | AC100V |
| 周波数 | 50/60Hz(スイッチによる切替式) |
| 消費電力 | 60VA |
| 外径寸法 | 幅341×奥行445×高さ1,207mm |
| 重量 | 31kg |
| 紫外線照射量 | 100μW/cm ² 以上 |
| スリッパ収納数 | 10足 |
| 使用環境条件 | 10~40℃ |
| 付属品 | 専用スリッパ(10足)、専用マット、付属シール、クリーナーセット |

■本体

スリッパ殺菌ディスペンサー
ブルー(SSDX)、ベージュ(SSDX-V)

■専用スリッパ

ブルーグレー、ミントグリーン、ワインレッド、ココアブラウン / 10足

■専用クリーナーセット

■オプション


■追加スリッパ

ブルーグレー、ミントグリーン、ワインレッド、ココアブラウン / 10足

■専用クリーナーセット

■紫外線ランプ (3本)

グローランプ (3個) セット

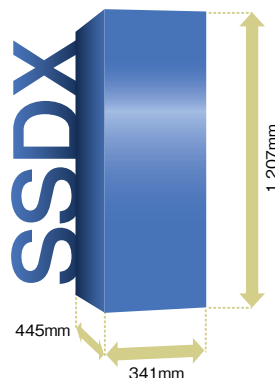

■名入れ (有料)

| | |
|----------|---------------------------|
| 発注単位 | 10足 |
| 字体 | 丸ゴシック |
| 文字色 | 白 |
| 印刷可能スペース | 1段組:10×80mm / 2段組:25×80mm |

1列10文字の2列で最大20文字まで印刷可能

※名入れ後の返品はお受けできませんので、ご注文時に名入れ文字のご指示・ご確認は入念をお願い致します。納品後の名入れはお受けできません。



■追加専用スリッパ(10足単位)

本体付属スリッパ10足とは別に、スリッパのみのご注文ができます



■定期交換部品

| | |
|------|---------------------------------|
| 品名 | 紫外線ランプ(3本セット) 15W×1灯 / 6W×2灯 |
| 交換目安 | 3,000時間 |

※紫外線ランプは効果に寿命があるため、定期交換が必要です。約1年での交換をお薦めします。

▲ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。
※本カタログ表面イメージ写真著作権：©Lev Dolgatsjov-Fotolia.com

取り扱い・お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

岡谷鋼機株式会社
東京本店 配管部

〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 丸の内中央ビル14階
TEL: 03-3215-7560
FAX: 03-3215-7676
E-mail: haikan.tricare@okaya.co.jp